

ANWENDUNGSHINWEISE:

1. auspacken...

Reißen Sie die Schutzfolie vorsichtig an der Einkerbung auf, entnehmen Sie das VA Condom und lassen Sie es sich entfalten.



2. halten...

Nehmen Sie das VA so in die Hand, daß Sie dabei das Schwämmchen und den V-Rahmen zusammendrücken.

3. einführen...

Halten Sie das Condom jetzt vor die Vagina und schieben Sie das Schwämmchen mit zwei Fingern soweit wie möglich hinein, bis dieses sich vollständig entfaltet hat. Das VA ist jetzt bereit!

4. entfernen...

Gleich nach dem Samenerguss drehen Sie den V-Rahmen zwei mal herum, um so die Öffnung des Beutels zu schließen und ein Auslaufen zu verhindern. Setzen Sie sich auf und entfernen Sie das Condom, indem Sie mit einer Hand den Rahmen halten und es mit der anderen Hand vorsichtig aus der Vagina herausführen. Gebrauchte Condoome in ein Papiertuch wickeln und so entsorgen, daß für andere, vor allem Kinder, keine Infektionsgefahr entsteht. Nicht in die Toilette werfen.

